
INSTRUCCIONES PARA EL KIT DE DETECCIÓN SISTEMÁTICA DEL CÁNCER DE COLON CON EL ANÁLISIS DE LAS HECES

ES NECESARIO ENVIAR POR CORREO LAS MUESTRAS EL MISMO DÍA QUE SE OBTIENEN. Por favor NO use Forever Stamps (estampillas de por vida); USPS le regresará el paquete.

Saque la botella recolectora y el formulario de UCSF Lab (laboratorio de UCSF).
Escriba la fecha en que usted recogió la muestra de heces en la botella recolectora y en el formulario de UCSF Lab justo antes de su movimiento intestinal.

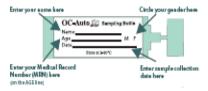

 Coloque el papel blanco de recolección entre el asiento del sanitario y el interior del mismo en la parte superior.



- **3.** Deposite la muestra de heces sobre la parte superior del papel de recolección.
- **4.** Abra la tapa verde girando y levantando la sonda.



 Con la sonda, raspe la superficie de la muestra de heces. Cubriendo la parte estriada de la sonda en su totalidad con la muestra de heces.




Cierre la botella de la muestra insertando la sonda hasta que la tapa verde quede bien encajada.



NO VUELVA A ABRIRLA

- 7. Deseche por el sanitario el papel de recolección. Este papel es biodegradable y no es dañino para el sistema séptico.
- **8.** Saque del sobre la bolsa de plástico y la almohadilla absorbente.
- Envuelva en la almohadilla absorbente la botella de la muestra e introdúzcala en la bolsa de plástico.
- Introduzca en el sobre la bolsa de plástico y el formulario UCSF Lab junto con la bosa de la muestra y la almohadilla absorbente.

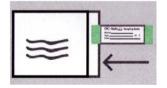

- Despegue la cinta de la solapa, dóblela por la línea predoblada y cierre el sobre apretando con firmeza.
- 12. Asegúrese de anotar en el sobre la dirección del remitente y pegar 5 sellos postales de primera clase. (NO use Forever Stamps; USPS le regresará el paquete)

ES NECESARIO ENVIAR POR CORREO LAS MUESTRAS EL MISMO DÍA QUE SE OBTIENEN. Si tiene alguna pregunta, llame al consultorio de su médico.